

mdose

Matériel médical

SOLUTIONS
POUR LE DOMICILE



ÉCRASEUR ET BROYEUR DE MÉDICAMENTS MAXGRIND™


- Une poudre fine sans effort
- Prise en main aisée
- Pratique et confortable
- Sûr et facile à nettoyer

NOUVEAUTÉ
2019

PILL CRUSHER

ÉCRASER ET BROYER SIMPLEMENT LES MÉDICAMENTS

Le premier broyeur manuel qui permet l'écrasement des comprimés suivant 2 process :

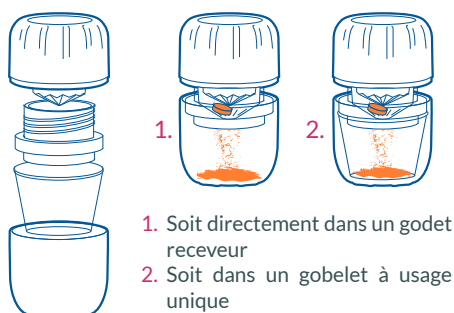

2 OPTIONS POSSIBLES :

La première possibilité est de broyer directement les médicaments dans le godet collecteur, pour ensuite y ajouter le véhicule adapté : eau, eau gélifiée ou compote.

La deuxième est d'insérer un gobelet de 30 ml à usage unique afin de faciliter la distribution, éviter le transfert dans un autre contenant et simplifier le lavage du broyeur.




BREVET DÉPOSÉ

- Dimensions : Ø55 x H88 mm
- Vendu à l'unité



Réf. : 24320

- **DOUBLE ACTION** : écrase et broie les médicaments en poudre fine, sans effort.
- **FACILE** : mouvement du moulin à poivre.
- **CONFORTABLE** : couvercle en caoutchouc antidérapant.
- **EXCLUSIF** : godet collecteur de poudre.
- **SÛR** : sans latex et sans bisphénol A (BPA).
- **PRATIQUE** : compartiment de stockage.

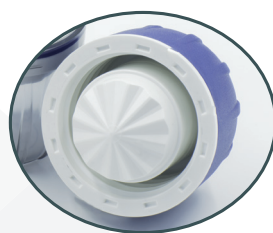

L'ASSURANCE D'UNE DÉLIVRANCE DES MÉDICAMENTS PLUS SÛRE ET PLUS COMPLÈTE !

La forme spécialement étudiée du Maxgrind™ assure à la fois un écrasement et un broyage du médicament avec un minimum de résidus et d'effort. Il permet ainsi une délivrance complète de la poudre obtenue.

CONFORTABLE ET FACILE D'ENTRETIEN :

Un broyeur ergonomique, facile à prendre en main et avec un couvercle en caoutchouc antidérapant pour faciliter l'opération de broyage.



MOUVEMENT SIMPLE ET SANS EFFORT :

Après avoir vissé le couvercle jusqu'à sentir le premier écrasement, il suffit simplement d'effectuer le mouvement du moulin à poivre, en vissant dévissant sans à fournir d'effort particulier.

RÉDUCTION DES RÉSIDUS DE POUDRE :

Une fois le broyage effectué, il faut continuer à broyer dans le vide car l'air, contenu dans le Maxgrind, va permettre aux résidus de poudre de tomber dans le godet receveur et donc limiter la perte de substances actives.



Retrouvez-nous sur :



www.mdose.fr

01 45 10 77 90

TOUTES NOS VIDÉOS SUR

www.mdose.fr

10 route de Brie-Comte-Robert - 94520 Périgny-sur-Yerres - FRANCE
Tél. 01 45 10 77 90 - Fax : 01 45 10 15 95 - E-mail : info@mdose.fr